



Hurtigstart - Pico trådløs trygghetsalarm P135E

- ✎ Personsøker lades med 9V lader P153C.
- ✎ Personsøker P137CAA startes ved at man trykker og holder "MENY" tasten inne 3 sekunder.
- ✎ Trykknapp bryter P135E er levert med batteri, og i sovende tilstand. Den må aktiveres før den tas i bruk.
- ✎ Aktivering av bryteren etter at den har vært i sovende tilstand; Trykk og hold "HJELP" knappen til du får kvitteringstone.
- ✎ Varsling; Når bryteren holdes inne til man får kvitteringstone (ca. 1 sekund) vil den varsles til personsøkeren med følgende varsel: "TRYGGHET - Help01"
- ✎ Slå av, deaktivere eller sette P135E tilbake i sovende modus; Bruk medfølgende magnetbryter. Dra magnetbryteren på venstre side av dekselet, og du får et lite kvitteringsblink i "alarm" lampen (Nå er Bryteren i sovende tilstand, og må aktiveres før den kan benyttes på vanlig måte igjen).

Lykke til!