

Hurtigstart – Personsøker P137CAA

1. Slå på Personsøkeren

- ✎ Start Personsøkeren (Trykk og hold "MENY" i 3 sekunder).

2. Endre navn på Personsøkers tilkoblede Node(r)

- ✎ Trykk og hold "MENY" i 3 sekunder for "setup & edit" og til "ResetAll"
- ✎ Klikk 3 x Pil høyre og Pil opp for "List"
- ✎ Bruk Pil høyre og/eller Pil venstre for å bla til den "Node'n" som skal få nytt navn.
- ✎ Klikk på Pil opp for å velge det navnet som skal endres.
- ✎ Klikk Pil høyre og Pil opp for "Rename"
- ✎ Nå kan du gi "Node'n" et navn (8 alfanumeriske tegn) – Editoren er meget enkel, og manøvreres ved hjelp av piltastene.
- ✎ Klikk på knapp som representerer "OK"
- ✎ Klikk på knapp som representerer "YES"
- ✎ Saving (Lagrer det nye Node navnet)

3. Slå av Personsøkeren

- ✎ Trykk og hold "MENY" i 3 sekunder for "setup & edit" og "ResetAll"
- ✎ Klikk 2 x Pil høyre og Pil opp for "Turn Off"

Lykke til!