

Selvhjelp – Personsøker P137CAA

1. Legge til Node (monitor/sensor) ved hjelp av AutoAdd-funksjonen.

- ✎ Startpunkt; "battery" pluss «grafisk signal for batteristyrken» vises i display
NB! Viktig å lese gjennom hele teksten før man begynner; dette fordi Personsøkeren faller tilbake til hvilemodus (Display viser "battery") 30 sekunder etter siste tastetrykk. (Det er med andre ord ikke tid til å lese og tenke før neste trekk).
- ✎ Trykk og hold "MENY" knappen til "setup & edit" vises i display. "ResetAll" vises i display.
- ✎ Trykk "Pil høyre" 4 ganger til display viser Pass0000. Skriv inn Passord ved å manøvrere med piltastene under displayet.
 - ✎ Passord P137CAA(1900); Pil opp, Pil høyre, Pil ned (display viser "Pass1900"), Pil venstre (For "OK"), Pil venstre (for "YES").
 - ✎ Passord Hvit P138BAA(0805); Pil høyre, Pil ned(2x), Pil høyre(2x), Pil opp(5x) (display viser "Pass0805"), Pil venstre (For "OK"), Pil venstre (for "YES").
 - ✎ Display viser "Add Node".
- ✎ Trykk Pil høyre – Display viser "Auto add"
- ✎ Trykk "VELG(Pil opp)" – For å velge "Auto add"
- ✎ Trykk Pil venstre – Bekrefte «YES» for "Auto Add"
Display viser "End-Add" - Nå er den klar til å detektere og tilkoble neste Node som sender radio signal.
- ✎ Trykk et kort trykk på "Påkallingsknappen" for å sende radiosignal.
Det kommer et lite pip i personsøker og display viser "Saving"
Display viser deretter NODE: 01
(Du kan velge å beholde "NODE: 01" som navn på den nye Fall sensoren; dette gjør du ved å trykke pil venstre(for OK), og pil venstre(for YES), display viser "NODE: 01" - "Saving"). Eller du benytte anledningen til å gi den ditt eget navn på Fallsensoren.
Bruk piltastene

2. Gi nytt navn til en node i personsøkeren

- ✎ Trykk og hold "MENY" knappen til du får "setup & edit".
Det kommer «ResetAll» i display.
- ✎ Trykk «Pil høyre» tra ganger til display viser List.
- ✎ Trykk (VELG) – For å velge "List"



- Trykk (VELG) – Når display viser navnet på den node som skal ha nytt navn for eksempel "Node 01" da kommer "Property" i displayet.

(Hvis ikke ønsket nodenavn vises i display: Bla vha (Pil vestre) og (Pil høyre) til det står ønsket nodenavn på øverste linje i display.

- Trykk (VELG) på eks. "Node 01" og "Property" dukker opp i displayet).
- Trykk (Pil høyre) – "Rename". Skriv inn nytt navn ved hjelp av piltastene.
- Trykk «Pil venstre» for OK
- Trykk «Pil venstre» for YES

3. Slette node fra personsøkeren.

- Trykk og hold "MENY" knappen til du får "setup & edit". Det kommer «ResetAll» i display.
- Trykk «Pil høyre» tre ganger til display viser List.
- Trykk (VELG) – For å velge "List"
- Trykk (VELG) – Når den node du ønsker å slette vises i displayet. (Bla vha (Pil vestre) og (Pil høyre) til ønsket node vises).
- Trykk (VELG) på "Nodenavnet" - "Property"
- Trykk (Pil høyre) – "Rename"
- Trykk (Pil høyre) – "Pass0000"
- Trykk (VELG) – "Pass1000"
- Trykk (Pil høyre) – "Pass1000"
- Trykk (MENY) – "Pass1900"
- Trykk (Pil venstre) - "OK"
- Trykk (Pil venstre) for "YES" - "Wander"
- Trykk (Pil høyre) – "ProgUnit"
- Trykk (Pil høyre) – "Delete"
- Trykk (VELG) for "Delete"
- Trykk (Pil venstre) for "YES"
- Ferdig (Nå er ønsket node slettet fra personsøkeren)

Lykke til!