



Allora 2

Allora 2 er en komplett tekst til tale enhet, med brukervennlig og enkel tilnærming. Det er et moderne og digitalt kommunikasjonsverktøy med et design som minner om en vintage skrivemaskin.

Allora 2 har en klar og tydelig stemme som uttaler det du skriver. Du kan ta opp lyder som ikke kan skrives og legge det inn på hurtigtaster. Den er utstyrt med ord- og setningsforslag hvor en kan spare opp til 50% av tastetrykk og få hurtigere kommunikasjon. Allora kan lære av det du skriver for å tilpasse seg ditt ordforråd og det er mulig å lagre mer enn 100 meldinger til taster eller forkortelser.

Allora 2 er utstyrt med en skjerm på fremsiden og en på baksiden for ansikt til ansikt kommunikasjon. Skjermen på baksiden kalles Eddy, denne kan kobles fra Allora 2, og da vil det automatisk dannes en bluetooth-sammenkobling og den kan forflyttes 4 meter bort fra Allora. Dette gjør det enklere å for eksempel kommunisere i støyende omgivelser, ha private samtaler eller kommunisere i bil. Dette er også fordel om en må holde avstand på grunn av smittevern.

Ved behov kan man enkelt sette på en fingerguide, denne er lett å ta av så man enkelt kan vaske enheten. Ved for eksempel skjelvinger er det mulig stille inn forsinkelse på tastene, for å unngå feil tastetrykk. Du kan sette et SIM-kort i Allora for å sende og motta SMS. Om det er behov for det kan det installeres GEWA-omgivelseskontroll for å styre TV, dører osv. Gi beskjed om det er behov for omgivelseskontroll.

Tekniske Spesifikasjoner

Allora 2 representerer en brukervennlig og enkel tilnærming. Selv om designet minner om en vintage skrivemaskin, er Allora 2 et moderne og digitalt kommunikasjonsverktøy.



Tekniske Spesifikasjoner	
Operativsystem	Windows CE 6.0
Prosesor	Marvell Xscale-PXA32
Minne	128Mb DDR SDRAM
Lagring	1 Gb NAND flash disk
Skjerm	5,5 ", OLED monokrom grønn, 256 x 64 piksler
2. skjerm "Eddy"	3,12 ", PMOLED monokrom grønn, 256 x 64 piksler
Vekt	1,03 kg
Lyd	HD-lyd, 2x høyttalere, 1x integrert mikrofon, 4x høyttalere (Eddy)
Batteri	21,6 Wh Li-Ion avtakbart batteri
Batteritid	48 timer normal bruk (standardinnstillinger) 13 timer intensiv bruk (kontinuerlig lydavspilling)
Lader	15V, 1A max (15W)
Bluetooth	for Eddy
Dimensjoner	17,5 x 25 x 2 - 6 cm 6,9 x 9,8 x 0,8 - 2,36 tommer
Betjening	Tastatur To brytere
Omgivelseskontroll	Infrarød (GEWA) (Valgbart)
Montering	DAESSY
Annet	Intern telefonmodul (kun tekstmeldinger) (alternativ)