

Allora

Brukerhåndbok

Innhold

1 - Innledning 5

- 1.1 Rengjøringsanvisning 5
- 1.2 Bærevesken 6

2 - Sikkerhetsregler 7

3 - Slå Allora-enheten på/av 9

- 3.1 Nullstill 9

4 - Hoved- og tilleggsdisplay 11

5 - Tastaturet 15

- 5.1 Funksjonstast 16
- 5.2 Lyd-tast 17
- 5.3 Meldingstast 17
- 5.4 Lyd-tast 18
- 5.5 Piltast (opp) 18
- 5.6 Piltast (ned) 18
- 5.7 Piltast (venstre) 18
- 5.8 Piltast (høyre) 18
- 5.9 Bekreft-tast 19
- 5.10 Fjern- eller Avbryt-tast 19
- 5.11 Applikasjon-tast 19
- 5.12 Favoritt-tast 19
- 5.13 Av/på-tast 19
- 5.14 Korrigering-tast 19
- 5.15 Enter-tast 20
- 5.16 Shift-tast 20

6 - Kontakter og indikatorer 22

6.1 Front 22

- 6.1.1 Mikrofon 22
- 6.1.2 Ladeindikator 22
- 6.1.3 Av/på-indikator 22
- 6.1.4 Infrarød-vindu 22

6.2 Side 23

- 6.2.1 Bryter 1 23
- 6.2.2 Bryter 2 23
- 6.2.3 USB-port 23
- 6.2.4 Hodetelefoner 23
- 6.2.5 Adapterinngang 23

6.3 Bakside 23

6.4 Tilleggsdisplayet 24

- 6.4.1 Av/på 24
- 6.4.2 Nullstill 24
- 6.4.3 Volum opp 25
- 6.4.4 Volum ned 25

7 - Batterier 26

- 7.1 Skifte batteriet i Allora-enheten 26
- 7.2 Skifte batteriet i tilleggsdisplayet 27

8 - Allora-applikasjoner 28

8.1 Kommunikasjon 28

- 8.1.1 Lagre meldinger 29

8.2 Ta opptak 30

8.3 Ta notater 30

- 8.3.1 Ta notater 31
- 8.3.2 Lagre notat 31
- 8.3.3 Åpne notat 31
- 8.3.4 Lagre notat (USB) 31
- 8.3.5 Åpne notat (USB) 31

Allora 2

- 8.3.6 Slett notat 31
- 8.4 Omgivelseskontroll (alternativ) 32
 - 8.4.1 Registrere infrarøde koder 32
 - 8.4.2 Sende infrarøde koder. 33
- 8.5 Sende og motta tekstmeldinger 33
 - 8.5.1 Installere SIM-kortet 33
 - 8.5.2 Angi PIN-koden 34
 - 8.5.3 Opprette forbindelse med teleoperatøren 34
 - 8.5.4 Sende en tekstmelding. 35
 - 8.5.5 Motta tekstmeldinger 36

9 - Betjene Allora-enheten med brytere. 38

- 9.1 Bruke én bryter. 38
- 9.2 Bruke to brytere. 39

10 - Oversikt over menyen og de ulike innstillingene 42

- 10.1 Tale 43
 - 10.1.1 Språk 43
 - 10.1.2 Stemme 43
 - 10.1.3 Hastighet 43
 - 10.1.4 Stemmevolum 43
 - 10.1.5 Generelt volum 44
 - 10.1.6 Tegn-ekko 44
 - 10.1.7 Ord-ekko 44
 - 10.1.8 Angi ekko 44
 - 10.1.9 Legg til uttale 44
 - 10.1.10 Fjern uttale 45
- 10.2 Tastatur 45
 - 10.2.1 Type 45
 - 10.2.2 Lyd 45
 - 10.2.3 Holdetid for tall 45
 - 10.2.4 Forsinkelse etter valg 46
 - 10.2.5 Akseptforsinkelse 46
- 10.3 Skanning 46
 - 10.3.1 Algoritme 46
 - 10.3.2 Gå videre 47
 - 10.3.3 Velg 47

- 10.3.4 Trinn-tid 47
- 10.3.5 Forlat rad 47
- 10.3.6 Skannepause 47
- 10.3.7 Forsinkelse etter valg 47
- 10.3.8 Lyd 47
- 10.4 Display 47
 - 10.4.1 Lysstyrke 48
 - 10.4.2 Kun store bokstaver 48
 - 10.4.3 Skrifttype for tekst 48
 - 10.4.4 Prediksjonsskrifttype 48
- 10.5 Tilleggsdisplay 48
 - 10.5.1 Tekst 49
 - 10.5.2 Tekst under skriving 49
 - 10.5.3 Kun store bokstaver 49
 - 10.5.4 Linjer 49
 - 10.5.5 Lyd 49
 - 10.5.6 Rulleteype 49
- 10.6 Prediksjon 49
 - 10.6.1 Prediksjon 50
 - 10.6.2 Legg til ord 50
 - 10.6.3 Fjern ord 50
 - 10.6.4 Auto-læring 51
 - 10.6.5 Skill mellom store/små bokstaver 51
 - 10.6.6 Maks repetisjoner 51
 - 10.6.7 Justering av tegnsetting 51
- 10.7 Dato/klokkeslett 51
 - 10.7.1 Endre dato 52
 - 10.7.2 Endre klokkeslett 52
- 10.8 Mobiltelefon 52
 - 10.8.1 Mobiltelefon 53
 - 10.8.2 SMS-lyd 53
 - 10.8.3 Pin-kode 53
 - 10.8.4 Koble til (igjen) 53
- 10.9 Generelt 53
 - 10.9.1 Menyspråk 54
 - 10.9.2 Spesifiser menypassord 54
 - 10.9.3 Standby etter 54

Allora 2

- 10.9.4 Slå av etter 55
- 10.9.5 Statuslinje 55
- 10.9.6 Forkortelser 55
- 10.9.7 Opptak med støyfilter 55
- 10.9.8 Les lagret mld 55
- 10.9.9 Stjerne 55
- 10.9.10 Shift Stjerne 56
- 10.9.11 Fn+Stjerne 56
- 10.10 Verktøy-meny 56
- 10.11 Sikkerhetskopier/gjenopprett 56
 - 10.11.1 Opprett full sikkerhetskopi 57
 - 10.11.2 Gjenopprett sikkerhetskopi 57
 - 10.11.3 Installer oppdatering 57
 - 10.11.4 Opprett datasikkerhetskopi 57
 - 10.11.5 Gjenopprett datasikkerhetskopi 57
 - 10.11.6 Gjenopprett fabrikkstandarder 57

1 - Innledning

Allora er et kommunikasjonshjelpemiddel basert på innskriving av tekst, som er svært lett å bruke. Meldinger som skrives inn med tastaturet på Allora-enheten uttales med en naturtro stemme av høy kvalitet. Intelligent prediksjon av ord eller setninger, forhåndslagrede meldinger og utvidelse av forkortelser gir betydelig raskere kommunikasjon.

Et avtakbart tilleggsdisplay med høy kontrast gjør at kommunikasjonspartnerne kan følge meldingen visuelt mens den skrives.

Allora har innebygd mikrofon for taleoptak. Disse optakene kan knyttes til enkelttaster på tastaturet.

Allora kan utstyres med en GSM-tilleggsmodul som gjør det mulig å sende og motta SMS-tekstmeldinger.

Allora har en kommunikasjonsstøttefunksjon og er ment for personer med nedsatt kommunikasjonsevne for generell bruk i hverdagen, forutsatt at de har tilstrekkelige motorisk og mental kapasitet til å bruke enheten. Enheten skal ikke brukes til kliniske, terapeutiske eller diagnostiske formål.

Allora kan alternativt utstyres med en infrarød (IR) omgivelseskontrollmodul (ECU) som kan lære og sende IR-koder for å betjene andre apparater. Denne modulen er designet for generell bruk, for eksempel med lyd- og bildeapparater eller boligautomatisering. Dette ECU-tillegget skal ikke brukes til kliniske, terapeutiske eller diagnostiske formål.

Allora er bærbar, men kan også monteres på en rullestol. En bærevekke kan brukes til å ta med enheten.

Allora er lett å bruke, og har utvidede funksjoner som støtter kommunikasjonen. Det anbefales å lese denne veiledningen før Allora-enheten brukes, for å sikre at den utnyttes optimalt.

1.1 Rengjøringsanvisning

Det anbefales å rengjøre Allora-enheten regelmessig for å minimere spredningen av bakterier og virus. Vær spesielt oppmerksom på tastaturet, der det kan samle seg bakterier og virus.

Det anbefales å bruke rengjøringsmidler som er utviklet spesifikt for IKT-utstyr til å rengjøre enheten, f.eks. Cyber Clean eller et antiseptisk desinfeksjonsmiddel som Neo-SabenyI (les bruksanvisningen). Bruk alltid en fuktig klut.

Bruk en tørr, myk klut til å fjerne støv. Flekker på kabinettet kan fjernes med en fuktig klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i høyttaleråpningene, mikrofonåpningen og kontaktene. Smuss nær kontaktene kan fjernes med en bomullspinne.

Bruk en tørr klut til å rengjøre skjermen. Ikke bruk kjøkkenpapir. Det kan føre til små riper. Fett og flekker på skjermen kan fjernes med et rengjøringsmiddel som er utviklet spesifikt for rengjøring av skjermer (spray eller våtservietter) eller et antiseptisk

desinfeksjonsmiddel. Unngå å trykke for hardt på skjermen når den rengjøres.

1.2 Bærevesken

Allora er utstyrt med en bæreveske for trygg bruk av enheten. Oppbevar enheten i bærevesken når den tas med, og bruk bæreremmen slik at enheten ikke faller ned. Hvis bæreremmen festes til motstående hjørner på vesken, holdes den i en egnet stilling mens du bærer den med deg. Pass alltid på at bærevesken er lukket, slik at Allora-enheten ikke kan falle ut.

Bruk en tørr eller lett fuktet klut til å rengjøre bærevesken. Du kan også bruke en myk håndbørste.

2 - Sikkerhetsregler

Allora er portabel og egnet for mobil bruk takket være den lave vekten. Vi anbefaler imidlertid at Allora alltid bæres med både bæreevnen og bæreremmen. På den måten unngår du at enheten faller ned på bakken og blir skadet.

Forsikre deg om at Allora-enheten er riktig montert og låst når den brukes på en rullestol.


Enheten bruker et li-ionbatteri. Når batteriet skiftes, må det gamle batteriet ikke kastes. Følg de gjeldende avfallsreglene i området. Du kan også returnere batteriet til Allora-leverandøren.


Hvis Allora-enheten ikke skal brukes på en lang stund, må den lagres med ladet batteri, og enheten må være slått av. (hold inne av/på-knappen i 5 sekunder).

Unngå å oppbevare den nær varmekilder eller på steder der den kan bli svært varm. Om sommeren kan den for eksempel bli svært varm i en bil. Høye temperaturer kan påvirke Allora-enhetens funksjonalitet og batteriytelse negativt.

Allora-enheten er ikke vanntett, men den er designet for å være sprutsikker på tastatursiden. Høytaleråpningene, der fuktighet eller smuss kan trenge inn, er plassert på undersiden av enheten. Hvis det kommer vann inn i høytaleråpningene, kan det påvirke høytalernes funksjon og redusere lyd kvaliteten. Vær forsiktig når Allora-enheten rengjøres, og følg rengjøringsanvisningene.

3 - Slå Allora-enheten på/av

Trykk kort på av/på-tasten  for å slå på Allora. Denne tasten finnes øverst til høyre på tastaturet. Det tar ca. 25 sekunder å slå på enheten. På/av-indikatoren blinker langsomt under oppstart. Når strømindikatoren lyser grønt, er enheten startet opp og klar til bruk så snart markøren vises på skjermen. Du kan nå skrive inn en melding med tastaturet. Trykk på Enter-

tasten  for å høre meldingen.

Trykk kort på av/på-tasten igjen for å sette Allora i standby-modus. Av/på-indikatoren blinker nå hvert 4. sekund. Allora-enhetens strømforsøring er minimalt i denne modusen. Trykk kort på en hvilken som helst tast for å aktivere Allora-enheten fra standby-modus.

Hold inne av/på-tasten i ca. 5 sekunder for å slå Allora-enheten helt av.

3.1 Nullstill

Hvis Allora-enheten blir inaktiv (f.eks. på grunn av elektrostatisk lading på en kontakt), kan enheten nullstilles ved å trykke på Nullstill-knappen. Enheten tvinges til å slås av. Trykk på av/på-knappen igjen for å starte Allora-enheten på nytt. Nullstill-knappen sitter på undersiden av enheten.



reset


4 - Hoved- og tilleggsdisplay

Allora-enheten har to grafiske display som kan vise tegn i ulike størrelser.

Det første og største displayet, over tastaturet, viser meldingene du skriver inn. Denne skjermen viser også ord- og setningprediksjon. Til høyre for skjermen vises statusparametere. På forsiden av Allora-enheten er det en andre og mindre skjerm som viser meldingen du skriver inn.



Den første skjermen er delt inn i tre deler. Den største delen brukes til å skrive meldinger. En melding kan inneholde flere linjer. Hvis du trykker på Enter-tasten, uttales meldingen. Du trenger ikke å fjerne meldingen for å skrive en ny melding, slik at du enkelt kan gå

tilbake til de tidligere meldingene dine. Bruk piltastene  eller







til å navigere til meldingen du vil bruke igjen, og trykk på


"Bekreft"-tasten  for å uttale den valgte meldingen.

Den andre delen av skjermen nederst på displayet er atskilt fra den første delen med en horisontal linje. I denne delen av skjermen vises ord- eller setningprediksjonen. Du kan også velge ikke å bruke prediksjon, og bruke hele skjermen til å skrive meldinger. Bytt mellom ordprediksjon, setningsprediksjon eller ingen

prediksjon ved å trykke tastekombinasjonen  .

Den tredje delen av skjermen, på høyre side, viser hovedstatusparametre for Allora-enheten.

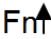	Batteristatus
	Demp/opphev demping
	Fn- eller Shift-tastens status
	ny tekstmelding

	GSM-mottak
(S)	SMS-modus

Det andre og mindre displayet på forsiden av Allora-enheten viser meldingen du skriver. Du kan imidlertid velge å vise hele meldingen først når meldingen uttales.




Du kan velge å vise 1, 2 eller 3 tekstlinjer på denne skjermen. Dette avgjør også størrelsen til tegnene. Hvis du velger 1 tekstlinje, vises større tegn, men færre tegn vises om gangen. Flere tekstlinjer gir mindre tegn.

Tilleggsdisplayet er normalt koblet til Allora-enheten, men du kan løsne den fra enheten og plassere den slik at flere personer kan se displayet.

Du kan også bære tilleggsdisplayet på deg eller gi det til kommunikasjonspartneren. Dette er spesielt nyttig i støyende omgivelser eller hvis du ønsker en privat samtale.

Tilleggsdisplayet kobles fra Allora-enheten ved å skyve spaken bak displayet bort fra displayet, og ta displayet ut av holderen.

Det anbefales ikke å koble tilleggsdisplayet fra Allora-enheten eller koble det til Allora-enheten mens oppstartprosedyren pågår. Vent med å gjøre det til enheten er ferdig startet opp.

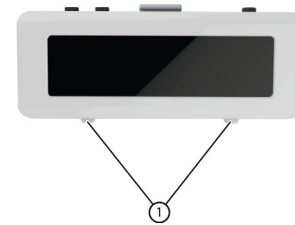


Hold en avstand på ca. 3 meter mellom Allora-enheten og tilleggsdisplayet for å sikre pålitelig trådløs forbindelse.

Sette tilleggsdisplayet tilbake i Allora-enheten: Ta displayet og skyv det med føttene opp inn i rommet i Allora-enheten, som vist i følgende bilde. Et klikk høres når den kobles til Allora-enheten.

Så snart tilleggsdisplayet skilles fra Allora-enheten, opprettes en trådløs tilkobling mellom Allora-enheten og tilleggsdisplayet. Du hører en kort pipelyd når tilkoblingen er fullført og klar til bruk. Både tekst og lyd overføres til tilleggs skjermen.

Tilleggsskjermen kan bæres i en stropp eller settes på et bord med de to føttene. Disse føttene gjør at tilleggsskjermen står litt tilbakelelt slik at lyden enkelt kan høres av lytteren.

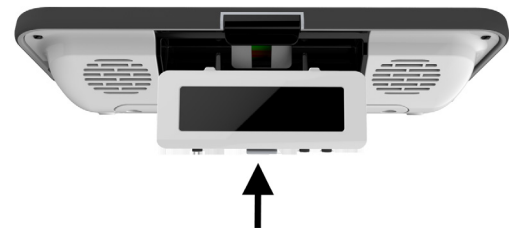

5 - Tastaturet

Allora-enheten har et vanntett gummitastatur med taster med samme størrelse som et vanlig tastatur. Tastaturet inneholder fullt alfabet, tall, ofte brukte spesialtegn (vist i blått), en Fn-funksjonstast, en Shift-tast, en Enter-tast og et antall kontrolltaster.

Trykk på den aktuelle tasten for å skrive et tegn på displayet. Tasteaksept og forsinkelsestider kan justeres for å unngå uønskede repetisjoner eller utilsiktede tastetrykk. Vær oppmerksom på at bruk av aksepttid og/eller forsinkelsestider må angis med tanke på brukerens behov. Hvis enheten plasseres hos en ny bruker, er det viktig å sikre at innstillingene justeres for å dekke brukerens behov, ellers kan det virke som tastaturet fungerer langsomt eller ikke i det hele tatt.

Hvis du vil velge et tall, holder du inne talltasten litt lenger, til tallet vises på skjermen. Trykk kort på talltast 1 til 5 for å velge det tilhørende ordet fra ordprediksjonslisten som vises nederst på skjermen.

Tegnene i tillegg til tallene 6, 7, 8, 9 og 0 kan skrives ved å trykke kort på de tilhørende tastene, på samme måte som andre tegn på tastaturet.

De følgende avsnittene gir en beskrivelse av en rekke viktige taster på Allora-tastaturet.

```
Type: ← Qwerty (svensk) →
Lyd: Av
Holdetid for tall: 0.2 sec
Forsinkelse etter valg: Av
```

5.1 Funksjonstast

Funksjonstasten Fn brukes alltid sammen med en annen tast. Trykk for eksempel på funksjonstasten og talltast 1 for å skrive et utropstegn. Du trenger ikke å holde inne funksjonstasten for å lage en kombinasjon. Du kan trykke Fn først, slippe den og deretter trykke 1 for å skrive et utropstegn. På samme måte kan du velge alle spesialtegn som vises i blått øverst til venstre på talltastene.

De blå symbolene på noen av tastene henviser til en funksjon som kan aktiveres når tasten brukes i kombinasjon med funksjonstasten Fn. Du kan også bruke kombinasjoner med andre taster som ikke har det blå tilleggssymboler.

Listen nedenfor viser en oversikt over andre tastekombinasjoner med funksjonstasten.

Table 1: Funksjonstast-kombinasjon







		Øke volumet.
		Redusere volumet.
		Gå til innstillingsmenyen på Allora-enheten.

Table 1: Funksjonstast-kombinasjon






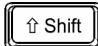







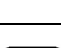
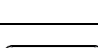











		Demp / opphev demping av lyden.
		Legg til meldingen i setningsprediksjonslisten.
	 	Slette setningsprediksjonen som vises fra setningsprediksjonslisten.
		Uttale datoen.
		Uttale klokkeslettet.
		Øke tegnstørrelsen. Når maksimal størrelse er nådd, starter neste trinn fra minstestørrelsen og fortsetter deretter å økes igjen.
	 	Redusere tegnstørrelsen. Når minste størrelse er nådd, starter neste trinn fra maksimal størrelse og fortsetter deretter å reduseres igjen.
		Slå tilleggsdisplayet på eller av. Denne innstillingen lagres til den endres igjen.

Table 1: Funksjonstast-kombinasjon

		Bytt mellom lyd fra tilleggsdisplayet eller fra Allora-enheten (kun når tilleggsdisplayet er frakoblet). Denne innstillingen lagres til den endres igjen.
		Bytt mellom ordprediksjon, setningsprediksjon og ingen prediksjon. Denne innstillingen lagres til den endres igjen.
		Vis Allora-enhetens batteristatus, status for tilleggsdisplayet og fastvareversjonen.
		Vis teleleverandøren, telefonens signalstyrke (kun teksting) og ledig minne til tekstmeldinger.

5.2 Lyd-tast

Stopp avspilling av alle lyder. Dette er nyttig hvis du gjør en feil.


5.3 Meldingstast

Meldingstasten brukes til å gjenopprette en lagret melding. Trykk først på meldingstasten, og deretter på en tall eller en bokstav.

Meldingen som er tilknyttet denne tasten, blir hentet frem. Dette gjelder også følgende kombinasjoner:

- meldingstast + Fn + tall eller bokstav,
- meldingstast + Shift + tall eller bokstav,
- meldingstast + Fn + Shift + tall eller bokstav.

Hvis du vil lagre en melding under en tast, skriver du først inn

meldingen, og deretter trykker du på "meldingstasten"  to ganger etterfulgt av tallet eller bokstaven der du vil lagre

meldingen. Trykk deretter på tasten "Bekreft"  eller "Avbryt"

. Du kan også bruke følgende kombinasjoner til å lagre en melding:

- Fn + tall eller bokstav,
- Shift + tall eller bokstav,
- Fn + Shift + tall eller bokstav.

5.4 Lyd-tast

"Lyd"-tasten brukes til å spille av lagrede lyder eller opptak. Trykk først på "Lyd"-tasten, og trykk deretter på et tall eller en bokstav for å spille av det tilhørende opptaket. Dette gjelder også følgende kombinasjoner:

- lydtast + Fn + tall eller bokstav,
- lydtast + Shift + tall eller bokstav,
- lydtast + Fn + Shift + tall eller bokstav.

Hvis du trykker to ganger på lydtasten, spilles "oppmerksomhet"-lyden av.

Se mer informasjon om hvordan opptak utføres i "Ta opptak" på side 30.

5.5 Piltast (opp)

Flytter markøren én linje opp, eller i kombinasjon med Fn-tasten: øker volumet.

5.6 Piltast (ned)

Flytte markøren én linje ned, eller i kombinasjon med Fn-tasten: reduserer volumet.

5.7 Piltast (venstre)

Flytter markøren én posisjon til venstre.

5.8 Piltast (høyre)

Flytter markøren én posisjon til høyre.

5.9 Bekreft-tast

Trykk på "Bekreft"-tasten for å uttale eller gjenta meldingen der markøren er plassert. Eller bekrefter et valg (i innstillingene eller applikasjonene).

Trykk Shift +  for å uttale alle meldinger som er laget siden siste "tøm skjerm".

5.10 Fjern- eller Avbryt-tast

Tømmer skjermen eller avbryter en handling eller et valg (i innstillingene eller applikasjonene).

5.11 Applikasjon-tast


Trykk på "Applikasjon"-tasten for å vise en liste over de tilgjengelige applikasjonene på Allora-enheten.

Avhengig av de tilgjengelige alternativene og brukerrettighetene kan applikasjonene være:

- Ny melding (alternativ): for å skrive en ny melding
- Les melding (alternativ): for å lese en tekstmelding
- Opptak: for å gjøre et lydopptak
- IR-omgivelseskontroll
- Adressebok (alternativ)

- Notater: for å ta notater
- Kommunikasjon: basisapplikasjon

Når du ikke er i favorittapplikasjonen for kommunikasjon (du bruker

en annen applikasjon eller endrer innstillingene), kan tasten  alltid brukes til å gå tilbake til Kommunikasjon-applikasjonen. (se "Stjerne" på side 55.)

Trykk Fn +  for å åpne innstillingsmenyen på Allora-enheten.

5.12 Favoritt-tast

Trykk på "Favoritt"-tasten for å starte applikasjonen umiddelbart. Denne tasten kan også kombineres med funksjonstasten Fn og med Shift-tasten for å lansere to andre favorittapplikasjoner.

5.13 Av/på-tast

Se mer informasjon om hvordan Allora-enheten slås på eller av i "Slå Allora-enheten på/av" på side 9.

5.14 Korrigerings-tast

Trykk på "Korrigerings"-tasten for å slette den siste inntastingen.

5.15 Enter-tast

Trykk på "Enter"-tasten for å starte en ny linje eller en melding.
Hvis taleparameteren "Angi ekko" er på (standardinnstilling), blir meldingen også uttalt.

5.16 Shift-tast



Trykk på "Shift"-tasten for å bruke stor bokstav. Du trenger ikke å holde inne Shift-tasten.

"Shift"-tasten brukes også til å danne bestemte kombinasjoner.

Andre nyttige kombinasjoner:

 + tallet 1–5 for å uttale den tilhørende ordprediksjonen.

  for å gjenopprette den sist slettede meldingen.

  Les alle meldinger som er laget siden siste "tøm skjerm".

6 - Kontakter og indikatorer



6.1 Front

6.1.1 Mikrofon

Den integrerte mikrofonen brukes til opptak med høy kvalitet. Du trenger ikke å snakke inntil mikrofonen under opptaket. Hold en avstand på ca. 20 cm, og snakk med normal stemme.

6.1.2 Ladeindikator

Indikatoren "Batterilading" lyser når strømadapteren til Allora-enheten er koblet til en stikkontakt. Indikatoren lyser oransje under lading. Indikatoren lyser grønt når batteriet er ferdig ladet. Ikke bruk noen annen strømadapter enn den som fulgte med Allora-enheten.

6.1.3 Av/på-indikator

Av/på-indikatoren viser Allora-enhetens driftsstatus. Indikatoren lyser ikke når Allora-enheten er slått helt av.

Allora-enheten kan imidlertid være i hvilemodus (standby-modus). I så fall blinker av/på-indikatoren hvert 4. sekund for å vise at den er klar til å kommunisere når du trenger det.

Strømindikatorene blinker når enheten slås på og under oppstartsprosessen. Dette kan ta omtrent 25 sekunder. Av/på-indikatoren lyser når oppstartsprosessen er ferdig og Allora-enheten er klar til bruk.


Det anbefales ikke å koble tilleggsdisplayet fra Allora-enheten eller koble det til Allora-enheten mens oppstartprosedyren pågår. Vent med å gjøre det til enheten er ferdig startet opp, eller gjør det mens Allora-enheten er i standby-modus.

Hvis strømindikatorene blinker rødt når du trykker på Av/på-tasten for å slå på enheten, betyr det at batteriet trenger lading.

6.1.4 Infrarød-vindu

Infrarød-vinduet brukes til å lære infrarøde koder. Hold fjernkontrollen til enheten du vil lære en kommando fra ca. 5 cm fra dette vinduet når den infrarøde koden skal læres.

6.2 Side

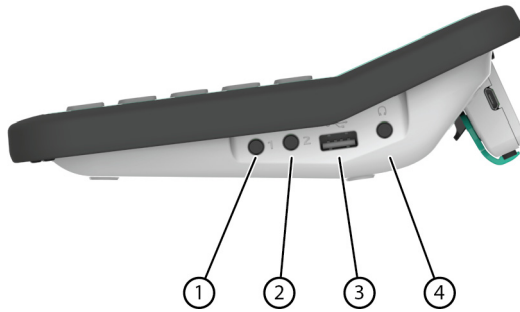

6.2.1 Bryter 1

Bruk denne inngangen til å koble bryter 1 til Allora-enheten for å styre en enhet med en skannealgoritme for én bryter.

6.2.2 Bryter 2

Bruk denne inngangen til å koble bryter 2 til Allora-enheten for å styre en enhet med en skannealgoritme for to brytere.

6.2.3 USB-port

USB-porten brukes til å utveksle notater eller sikkerhetskopier, og til å gjenopprette data via en USB-minnepinne. Denne porten har ingen andre funksjoner.

6.2.4 Hodetelefoner

Denne kontakten brukes til å koble til hodetelefoner.

6.2.5 Adapterinngang

Dette er inngangen til strømadapteren. Ikke bruk noen annen strømadapter enn den som fulgte med Allora-enheten. Adapteren lader også det interne batteriet i Allora-enheten og batteriet i tilleggdisplayet (når det er tilkoblet Allora-enheten).

6.3 Bakside

Batteridekselet og Nullstill-knappen sitter på undersiden av Allora-enheten.

Allora-enheten har et oppladbart batteri. Dette batteriet lades internt med adapteren som følger med enheten. SIM-kortkontakten sitter i batterirommet på undersiden av Allora-enheten. Batterirommet skal bare åpnes hvis batteriet skal skiftes eller SIM-kortet skal settes inn eller skiftes. Batterirommet må åpnes med en bestemt skrutrekker (Torx TX 10).

Nullstill-knappen kan brukes til å tvinge Allora-enheten til å slås av hvis den ikke fungerer som den skal. Trykk på av/på-tasten for å starte Allora-enheten på nytt.




6.4 Tilleggsdisplayet



Allora-enheten har et tilleggsdisplay som viser meldingene du skriver. Du kan imidlertid velge å vise hele meldingen først når meldingen uttales.

Du kan velge mellom 1, 2 og 3 tekstlinjer. Tegnene er større hvis du bruker én tekstlinje. Det betyr imidlertid at færre tegn vises om gangen. Hvis du velger tre tekstlinjer, blir tegnene mindre.

Tilleggsdisplayet er montert på Allora-enheten, men du kan løsne det fra enheten. Det er støtte for både innskrevne meldinger og lyd når tilleggsdisplayet er løsnet fra enheten.

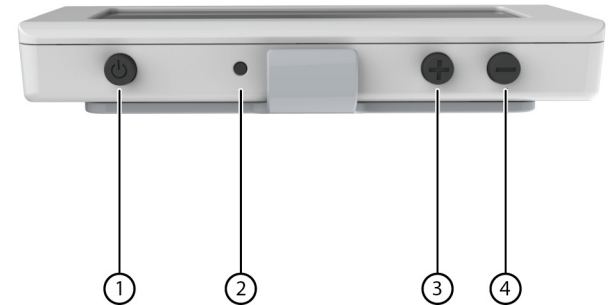

Tilleggsdisplayet har en rekke betjeningsknapper. Disse betjeningsknappene er bare aktive når tilleggsdisplayet er løsnet fra hovedenheten.

6.4.1 Av/på

Trykk på av/på-knappen for å slå på tilleggsdisplayet (eller slå det av når det er aktivt). Du trenger bare å gjøre dette når tilleggsdisplayet er løsnet fra Allora-enheten. Så snart tilleggsdisplayet slås på, opprettes en trådløs tilkobling mellom Allora-enheten og tilleggsdisplayet. Dette kan ta noen sekunder. Du hører en pipelyd når tilkoblingen er opprettet. Et symbol vises en kort stund på tilleggsdisplayet for å bekrefte tilkoblingen.

6.4.2 Nullstill

Hvis tilleggsdisplayet slutter å reagere, kan du trykke på Nullstill-knappen for å tvinge displayet til å slås av. Nullstill-knappen aktiveres ved å trykke på den med en spiss gjenstand, for eksempel en kulepenn. Trykk forsiktig på knappen til et "klikk"

høres, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på displayet igjen.

6.4.3 Volum opp

Denne knappen brukes til å øke volumet på tilleggsdisplayet. Dette endrer også voluminnstillingen på Allora-enheten. Volumnivået vises på skjermen.

6.4.4 Volum ned

Denne knappen brukes til å redusere volumet på tilleggsdisplayet. Dette endrer også voluminnstillingen på Allora-enheten. Volumnivået vises på skjermen.

Kontakten på siden av tilleggsdisplayet brukes kun til serviceformål.

Trykk samtidig på "Volum ned"-knappen og av/på-knappen for å vise statusparameterne for tilleggsdisplayet. Dette er serienummeret, Mac-adressen (identifikasjonsadressen for den trådløse tilkoblingen), programvareversjonen og batteriets status.

7 - Batterier

Allora-enheten har et internt li-ionbatteri. Allora-enheten kan gi 10 timers kontinuerlig lyd og tale med et nytt, fulladet batteri. Batteriets kapasitet sammen med enhetens strømsparesystemer skal være tilstrekkelig til å gi brukeren en hel dags bruk før enheten må lades.

Koble til strømadapteren for å lade det interne batteriet. Ikke bruk noen annen strømadapter enn den som fulgte med Allora-enheten.

Du kan fortsette å bruke Allora-enheten mens den lades, men det fører til at det tar lengre tid å lade batteriet helt opp.

Ladeindikatoren skifter farge fra oransje til grønt når batteriet er ferdig ladet. Strømadapteren kan være tilkoblet selv om batteriet er ferdig ladet. Det anbefales likevel å koble strømadapteren fra enheten når den er ferdig ladet, for å unngå unødige uhell, for eksempel ved at man trekker i strømledningen.

Tilleggsdisplayet har også et internt batteri. Dette batteriet lades av Allora-enheten når tilleggsdisplayet er montert på Allora-enheten.

Trykk samtidig på "Volum ned"-knappen og av/på-knappen for å vise statusparameterne for tilleggsdisplayet. Dette er serienummeret, Mac-adressen (identifikasjonsadressen for den trådløse tilkoblingen), programvareversjonen og batteriets status.

7.1 Skifte batteriet i Allora-enheten

Batteriet sitter bak batteridekselet på Allora-enheten. Batteridekselet er festet med spesialskruer. Fjern batteridekselet bare hvis det er nødvendig, og bruk bare riktig utstyr, en Torx-skrutrekker (Torx TX 10).

Hold inne av/på-tasten i ca. 5 sekunder for å slå enheten helt av. Forsikre deg om at Allora-enheten ikke er koblet til strømmettet.

Legg Allora-enheten med skjermen ned på en myk overflate slik at skjermen ikke blir skadet.

Skruløs skruene med en Torx TX 10-skrutrekker. Vipp batteridekselet ut fra skruehullene og bort fra kabinettet. Batteriet er nå synlig, og kan fjernes fra apparatet. Sett det nye batteriet inn i enheten. Kontroller at batteriet vender riktig vei og at det har kontakt. Det skal være lett å gjøre dette uten å bruke makt.

Monter batteridekselet igjen. Det skal også kunne gjøres uten å bruke makt.

Bruk Torx TX 10-skrutrekkeren til å skru batteridekselet på plass igjen. Unngå å stramme skruene for mye.

7.2 Skifte batteriet i tilleggsdisplayet

Kontakt leverandøren for å få skiftet batteriet i tilleggsdisplayet.

Det gamle batteriet må ikke kastes som restavfall. Følg gjeldende retningslinjer for gjenvinning. Alternativt kan batteriet returneres til forhandleren.

8 - Allora-applikasjoner

Allora-enheten støtter ulike applikasjoner. Avhengig av de tilgjengelige alternativene og brukerrettighetene kan applikasjonene være:

- Ny melding (alternativ): for å skrive en ny melding
- Les melding (alternativ): for å lese en tekstmelding
- Opptak: for å gjøre et lydopptak
- IR-omgivelseskontroll
- Adressebok (alternativ)
- Notater: for å ta notater
- Kommunikasjon: basisapplikasjon

8.1 Kommunikasjon

Allora-enhetens basisapplikasjon er å skrive og uttale meldinger i situasjoner der man snakker ansikt til ansikt. Allora-enheten starter alltid med denne applikasjonen. Hvis du arbeider i en annen applikasjon eller har justert Allora-enhetens innstillinger, kan du

trykke på applikasjon-tasten  for å gå til å gå tilbake til Kommunikasjon-applikasjonen.

Hvis du vil skrive en melding, skriver du den inn med tastaturet på Allora-enheten.

Du kan velge ett av ordene som vises i ordprediksjonslisten (nedre del av skjermen) ved å velge det aktuelle tallet, 1 til 5. Det er aldri mer enn 5 ord i listen.

Når du bruker setningprediksjon, trykker du talltast 1 for å velge setningen. Trykk 2 for å vise den neste setningen hvis en er tilgjengelig.

Tall skrives ved å holde inne en talltast litt lenger til tallet vises på skjermen.

Trykk på Enter-tasten  for å skrive inn en ny linje og for å uttale meldingen. Hvis du ikke vil at Enter-tasten skal aktivere uttale av meldingen, slår du av Angi ekko i taleparameterne.


Du kan også bruke Bekreft-tasten  til å uttale meldingen der markøren er plassert.

Bruk tastekombinasjonen   for å øke tegnstørrelsen.



Du trenger ikke å fjerne meldingen for å skrive en ny melding. Du kan beholde meldingene fra samtalen og når som helst gå tilbake

til en av dem ved å bruke piltasten  eller . Trykk på "Bekreft"-tasten for å uttale den valgte meldingen.

Trykk tastekombinasjonen   for å uttale alle meldingene.


Trykk på tasten  for å fjerne alle meldingene. Hvis du sletter meldingene ved en feil, kan du gjenopprette de slettede



meldingene ved å trykke tastekombinasjonen  .

Du kan endre mellom ordprediksjon, setningsprediksjon og ingen prediksjon med tastekombinasjonen  .

8.1.1 Lagre meldinger





1. Legge til meldinger i listen over setningsprediksjoner

Trykk først på tasten  for å fjerne alle meldingene. Skriv

deretter inn meldingen og trykk tastekombinasjonen  . Du hører et kort lydsignal som bekrefter at setningen er lagt til i listen over setningsprediksjoner.

Bruk tastekombinasjonen    hvis du vil slette setningen som vises i prediksjonsområdet fra listen over setningsprediksjoner.



2. Lagre meldinger "under en tast"

Trykk først på tasten  for å fjerne alle meldingene. Skriv deretter inn meldingen og trykk to ganger på Melding-tasten , og trykk deretter på en bokstav eller et tall. Bekreft med  hvis du vil at meldingen skal knyttes til den valgte bokstaven eller det valgte tallet. Trykk  for å avbryte.

Du kan også bruke følgende tastekombinasjoner til å lagre meldinger:

- Fn + tall eller bokstav,
- Shift + tall eller bokstav,
- Fn + Shift + tall eller bokstav.

Hvis du vil hente frem en melding, trykker du først på "Melding"-

tasten  og deretter på et tall eller en bokstav. Meldingen som er knyttet til tasten vises deretter på skjermen. Du kan legge til eller fjerne noe hvis du vil, og deretter trykker du på "Bekreft"-tasten  for å uttale den.

Hvis du vil at meldingen skal uttales umiddelbart etter at den er hentet frem, må du aktivere parameteren "Les lagret melding" (se "Les lagret mld" på side 55).

Dette gjelder også følgende tastekombinasjoner:



- meldingstast + Fn + tall eller bokstav,
- meldingstast + Shift + tall eller bokstav,
- meldingstast + Fn + Shift + tall eller bokstav.

3. Bruke en forkortelse som en melding.

Du kan også erstatte meldingen med en forkortelse. Allora-enheten utvider forkortelsen til den fullstendige setningen når du skriver inn et mellomrom.

Skriv først inn meldingen for å lage en forkortelse.

Trykk to ganger på Melding-tasten  etterfulgt av forkortelsen

du vil bruke. Bekreft med  hvis du vil at meldingen skal knyttes til forkortelsen. Trykk  for å avbryte.


Når du vil hente frem meldingen, skriver du bare inn forkortelsen og trykker på mellomromtasten.

8.2 Ta opptak

Allora-enheten har en innebygd mikrofon som gjør det enkelt å ta opp talemeldinger.

Trykk på "Applikasjon"-tasten  for å vise de tilgjengelige applikasjonene, og velg Opptak. Bekreft valget med Enter-tasten for å starte opptaket. Følg instruksjonene:

1. Velg et tegn som du vil knytte til opptaket.
2. Hold inne den ønskede tasten. Opptaket starter etter 2 sekunder.
3. Hold inne tasten så lenge du vil gjøre opptak.
4. Slipp tasten for å stoppe opptaket.

Trykk på tasten  igjen for å høre opptaket. Hvis du ta opptaket på nytt, holder du inne tasten igjen.

Opptak kan spilles av i Kommunikasjon-applikasjonen ved å trykke på Lyd-tasten etterfulgt av tegnet som er knyttet til lyden eller opptaket du vil spille av.


Du kan også bruke følgende tastekombinasjoner til å lagre et opptak:

- Fn + tall eller bokstav,
- Shift + tall eller bokstav,
- Fn + Shift + tall eller bokstav.

8.3 Ta notater

Du kan bruke Allora-enheten til å ta notater. Notater kan lagres på enheten eller på en USB-minnepinne, slik at de kan overføres til en datamaskin. Du kan også skrive notater eller samtaler på en datamaskin, og deretter overføre dem til Allora-enheten. Utsveksling av data mellom Allora-enheten og en datamaskin utføres med en USB-minnepinne.

8.3.1 Ta notater

Tøm skjermen med tasten  når du vil ta et notat. Nå kan du begynne å skrive notatet. Trykk på Enter-tasten for å begynne på en ny linje. Hvis du trykker på Enter-tasten, uttales den foregående setningen automatisk. Du kan unngå dette ved å deaktivere Angi ekko i taleinnstillingene, eller du kan dempe Allora-enheten med

tastekombinasjonen   .

Notatet lagres ved å trykke på Applikasjon-tasten , velge "Notater" og trykke på Enter-tasten.



Deretter kan du velge:

8.3.2 Lagre notat

For å lagre notatet i det interne minnet i Allora-enheten. Hvis du gjør dette, blir du bedt om å gi notatet et navn.

8.3.3 Åpne notat

Velg dette alternativet for å åpne et notat som er lagret på Allora-enheten. En liste over lagrede notater vises på skjermen. Bruk



piltasten  eller  til å navigere til notatet du vil åpne, og trykk på Enter-tasten. Notatet vises nå på skjermen.

Nå kan du redigere notatet eller navigere til en setning som du vil uttale. Trykk deretter på tasten .

8.3.4 Lagre notat (USB)

Velg dette alternativet hvis du vil lagre notatet på en USB-minnepinne. Du blir bedt om å gi notatet et navn.

8.3.5 Åpne notat (USB)

Velg dette alternativet for å åpne et notat som er lagret på en USB-minnepinne. En liste over lagrede notater vises på skjermen. Bruk piltasten  eller  til å navigere til notatet du vil åpne, og trykk på Enter-tasten. Notatet vises nå på skjermen.

Nå kan du redigere notatet eller navigere til en setning som du vil uttale. Trykk deretter på tasten .

8.3.6 Slett notat

Velg dette alternativet for å slette et notat fra det interne minnet på Allora-enheten. En liste over lagrede notater vises på skjermen.

Bruk piltasten  eller  til å navigere til notatet du vil slette,

og trykk på Enter-tasten for å velge. Bruk tasten  for å

bekreft eller tasten  for å avbryte.

8.4 Omgivelseskontroll (alternativ)

Hvis Allora-enheten er utstyrt med en ECU-enhet (Environment Control Unit), kan du bruke den til å sende infrarøde koder for å betjene andre enheter, for eksempel en TV, en CD-spiller eller lamper, dører og vinduer. Dette er bare mulig hvis de støtter infrarød betjening og de infrarøde kodene kan gjenkjennes av Allora-enhetens ECU-enhet.

8.4.1 Registrere infrarøde koder

På høyre side av skjermen og under av/på-indikatoren finner du et lilla vindu. Allora-enheten registrerer de infrarøde kodene gjennom dette vinduet. Vær oppmerksom på at noen enheter har komplekse infrarøde koder. Hvis det er tilfelle, kan det være at kodene ikke kan læres.



Trykk på Applikasjon-tasten  for å vise de tilgjengelige applikasjonene. Velg Omgivelseskontroll og trykk på Enter-tasten.

Du kan nå velge mellom:

1. Send
2. Lære
3. Sikkerhetskopi (via USB)
4. Gjenopprett (via USB)


Trykk 2 for å velge Lære.

Det vises en liste over tilgjengelige plasseringer (kommandoer) som kan brukes til å lagre infrarøde koder: gw1 .. gw150

Bruk piltasten  eller  til å velge en av kommandoene, og trykk på Enter-tasten for å starte læreprosedyren:

Først blir du spurt om du vil overskrive den eksisterende

kommandoen. Trykk  hvis du vil overskrive den og lære en ny

kode. Trykk  hvis du ikke vil gjøre dette.

Hold fjernkontrollen til enheten du vil lære en infrarød kode fra ca. 5 cm fra det lilla vinduet, og trykk på tasten på fjernkontrollen for kommandoen du vil lære. Hold tasten inne til Allora-enheten indikerer at du kan slippe den.

Allora-enheten ber deg gjenta dette. Trykk og hold inne den samme tasten en gang til, til Allora-enheten indikerer at du kan slippe den igjen.

Nå kan du gi kommandoen et spesifikt navn, for eksempel volum opp, TV på osv. Det anbefales å velge et kort navn som beskriver kommandoen.

8.4.2 Sende infrarøde koder.

Trykk på Applikasjon-tasten  for å vise de tilgjengelige applikasjonene. Velg Omgivelseskontroll og trykk på Enter-tasten.


Du kan nå velge mellom:

1. Send
2. Lære
3. Sikkerhetskopi (via USB)
4. Gjenopprett (via USB)

Trykk 1 for å velge Send.

Det vises en liste over tilgjengelige plasseringer (kommandoer) som kan brukes til å lagre infrarøde koder: gw1 .. gw150. Noen av kommandoene kan ha fått et annet navn i læreprosedyren.

Bruk piltasten  eller  til å velge kommandoen du vil

utføre, og trykk deretter på Enter-tasten . Den infrarøde koden blir sendt.

111 av de 150 Gewa-kommandoene har også en tilknyttet tast eller tastekombinasjon. Hvis du kjenner tasten eller tastekombinasjonen, kan du trykke den direkte.

8.5 Sende og motta tekstmeldinger

Allora-enheten kan utstyres med en GSM-tilleggsmodul slik at du kan sende og motta tekstmeldinger fra andre personer. Hvis Allora-enheten din er utstyrt med denne modulen, må applikasjonen initialiseres før du kan bruke den. Dette gjøres ved å utføre de følgende 3 trinnene: sett inn SIM-kortet, tast den aktuelle PIN-koden og opprett forbindelse med teleoperatøren.

8.5.1 Installere SIM-kortet

SIM-kortet er en liten brikke som må settes inn i Allora-enheten for å kunne bruke GSM-modulen.



SIM-kortet sitter i batterirommet på Allora-enheten.

Hold inne av/på-tasten i ca. 5 sekunder for å slå enheten helt av. Kontroller at Allora-enheten ikke er koblet til strømmettet.

Legg Allora-enheten med skjermen ned på en myk overflate slik at skjermen ikke blir skadet.

Skru løs skruene med en Torx TX 10-skrutrekker. Vipp batteridekselet ut fra skruerhullene og bort fra kabinettet. Batteriet er nå synlig, og kan fjernes fra apparatet.

Følgende bilde viser SIM-kortets plassering.





I batterirommet ser du et lite symbol som viser riktig plassering av SIM-kortet. Skyv SIM-kortet forsiktig inn SIM-kortkontakten i pilens retning.

Sett batteriet tilbake i batterirommet. Sett den venstre siden av batteriet (ved siden av SIM-kortet) inn i batterirommet først, og slipp deretter den andre siden av batteriet forsiktig ned i batterikontakten. Dette sikrer at SIM-kortet sitter som det skal og at batteriet får god kontakt.

8.5.2 Angi PIN-koden

Når SIM-kortet er installert, kan du angi PIN-koden.

Trykk Fn  for å åpne innstillingene på Allora-enheten.

Bruk piltasten  eller  til å navigere til elementet Mobiltelefon, og trykk Enter. Nå har du åpnet innstillingsmenyen for mobiltelefonmodulen i Allora-enheten

Bruk piltasten  eller  til å navigere til elementet PIN-kode, og trykk Enter. Følgende vindu vises på skjermen:







Angi PIN-koden og bekreft med  eller trykk  for å avbryte.

8.5.3 Opprette forbindelse med teleoperatøren

Når PIN-koden er angitt, er du klar til å opprette forbindelse med teleoperatøren.

Trykk Fn  for å åpne innstillingene på Allora-enheten.


Bruk piltasten  eller  til å navigere til elementet Mobiltelefon, og trykk Enter. Nå har du åpnet innstillingsmenyen for mobiltelefonmodulen i Allora-enheten.




Bruk piltasten  eller  til å navigere til elementet Koble til (igjen), og trykk Enter. Når forbindelsen er opprettet, vises et symbol for signalstyrke  på høyre side av displayet.

Tastekombinasjonen   kan brukes til å kontrollere signalstyrken, teleoperatøren og ledig minneplass på SIM-kortet. Vær oppmerksom på at du ikke kan motta flere tekstmeldinger nå minnet på SIM-kortet er fullt. Hvis det skjer, kan du frigjøre minneplass ved å slette gamle tekstmeldinger.

8.5.4 Sende en tekstmelding.

Det anbefales å sette opp en kontaktliste først.



Kontaktlisten åpnes ved å trykke på Applikasjon-tasten  for å vise de tilgjengelige applikasjonene.

Bruk piltasten  eller  til å navigere til 5 - Adressebok, og trykk Enter .

Følgende vindu vises på skjermen:






Velg <Legg til kontakt> og trykk  for å legge til en ny kontakt.

Angi navn og telefonnummer, og bekreft med  eller trykk  for å avbryte.

Gjenta prosedyren for å legge til flere kontakter.

Hvis du velger en eksisterende kontakt, kan du redigere eller slette den.



Trykk  eller  for å gå tilbake til Kommunikasjon-applikasjonen.


Nå kan du begynne å skrive tekstmeldinger. Trykk på Applikasjon-tasten  for å vise de tilgjengelige applikasjonene.


Bruk piltasten  eller  til å navigere til 1- Ny melding, og trykk Enter.

Det vises et tomt skjermbilde der du kan skrive tekstmeldingen. Statusdelen av displayet viser symbolet (S) for å indikere at du er i tekstmeldingsmodus.

Trykk på Bekreft-tasten  når du er klar til å sende tekstmeldingen. Listen over kontakter vises på skjermen. Skriv inn


et telefonnummer direkte, eller bruk piltasten  eller  til å velge en kontakt i listen.

Trykk Enter  for å sende meldingen. Du hører en lyd og ser meldingen "Melding sendt" når meldingen er sendt.

Trykk  igjen hvis du også vil sende meldingen til en annen kontakt.

Trykk på Applikasjon-tasten  for å gå tilbake til Kommunikasjon-applikasjonen.

8.5.5 Motta tekstmeldinger

Når du mottar en tekstmelding fra en annen person, vises et konvolutt-symbol  i statusvinduet. Du hører også et lydsignal. Vær oppmerksom på at konvolutt-symbolet også indikerer at det finnes nye meldinger som du ikke har lest ennå.

Hvis du vil lese en ny melding, trykker du på Applikasjon-tasten




og velger "Les meldinger". En liste over meldinger vises på skjermen, med den nyeste meldingen øverst.

Den første linjen viser navnet på avsenderen av meldingen, og den andre linjen viser begynnelsen på meldingen. En stjerne * foran avsenderen betyr at meldingen ikke er lest ennå.

Bruk piltasten  eller  til å navigere til meldingen du vil

lese, og trykk på Enter-tasten  for å åpne meldingen.

Hele meldingen vises nå på skjermen.

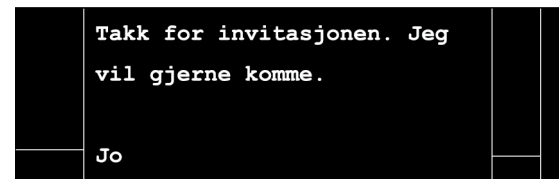

Bruk piltasten  eller  til å navigere i meldingen.

Du kan se meldingens avsender, dato og klokkeslett på slutten av meldingen. Du kan velge å besvare meldingen umiddelbart (trykk

talltast 1=Svar), å slette meldingen (trykk talltast 2=Fjern) eller å lese den opp høyt (trykk talltast 3=Les).

Tekstmeldingene lagres på SIM-kortet og i Allora-enhetens interne minne. SIM-kortet lagrer de fem nyeste meldingene, og alle andre meldinger lagres i Allora-enhetens interne minne.

9 - Betjene Allora-enheten med brytere.

Allora-enheten kan også betjenes med 1 eller 2 brytere. Allora-enheten viser da tegn og egenskaper på skjermen, som du kan trenge for å skrive en melding. Hvis tegnet eller tegnsekvensen som inneholder tegnet du trenger, vises, trykker du på bryteren for å velge den. Denne operasjonen kalles skanning.

Allora veileder deg gjennom skanningen ved å vise en rekke alfanumeriske tegn, som du kan velge for å skrive en setning eller en melding. Disse radene vises på den nedre delen av skjermen, der ordprediksjoner vanligvis vises. I en annen algoritme er sekvensene ikke rader på tastaturet, men de er organisert på en mer effektiv måte. Følgende to formater er tilgjengelige og kan brukes til skanning:

1. Tastaturskanning rad for rad.

Skjermen viser hver linje på tastaturet i rekkefølge. Du kan bruke bryteren til å velge linjen som inneholder den ønskede bokstaven, og deretter skanne til bokstaven. Når den er valgt, starter skanningen rad for rad igjen.

2. Vanlig bokstavskanning.


I dette formatet vises bokstavene etter hvor ofte de brukes. Bokstaver som vokaler og ofte brukte konsonanter vises for eksempel først, og mindre vanlige konsonanter vises på de neste linjene. Dette gir en mer effektiv skanneopplevelse, slik at meldingene kan skrives raskere.

9.1 Bruke én bryter.


Ved skanning med én bryter går systemet gjennom de ulike sekvensene automatisk med en bestemt rytme.

Koble en bryter til bryterinngang 1 på Allora-enheten (vær oppmerksom på at skanningen starter automatisk når bryteren kobles til) og angi ønskede parametere på følgende måte:

Trykk tastekombinasjonen  . Følgende liste vises på skjermen:

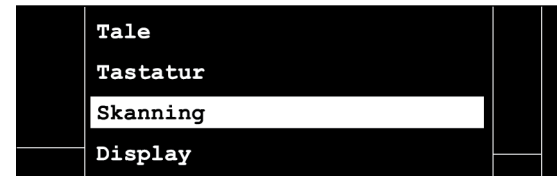

Bruk piltasten  eller  til å velge elementet Skanning, og velg det med Enter-tasten . Følgende parameterliste vises på skjermen:

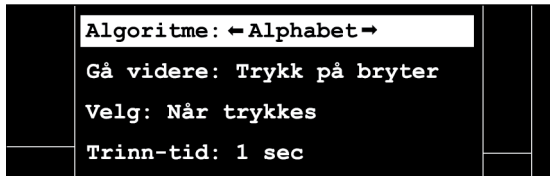

Velg først parameteren **Algoritme**. Hvis du har et QWERTY-tastatur, kan det være best å velge Qwerty, men du kan også bruke en annen algoritme: Alfabet. Denne algoritmen skanner ikke gjennom radene på tastaturet, men bruker en mer effektiv sekvens av tegn og funksjoner.

Sett parameteren **Gå videre** til Automatisk. Det betyr at Allora automatisk går gjennom de ulike sekvensene i skannealgoritmen. Hvis tegnet eller tegnsekvensen som inneholder tegnet du trenger, vises, trykker du på bryteren for å velge den.

Parameteren **Velg** gjør det mulig å bestemme om du skal velge ved å trykke (Ved trykk), ved å slippe bryteren (Ved slipp) eller ved å holde inne bryteren i et spesifikt tidsrom. Ved å stille inn en holdetid, kan du unngå uønskede tastetrykk.

Trinn-tid definerer hastigheten eller rytmen som Allora bruker til å gå trinnvis gjennom de ulike sekvensene.

Hvis du gjør en feil og for eksempel velger en rad som ikke inneholder det ønskede tegnet, kan du vente til Allora har gått gjennom denne raden noen ganger før den forlater den "uriktige" raden. Parameteren **Forlat rad** angir hvor mange ganger Allora går gjennom en rad før den forlates.


Pause skanning definerer antall sekvenser som Allora skal kjøre før den stopper algoritmen hvis det ikke er noen bryteraktivitet i løpet av tidsrommet. Hvis en bryter trykkes, startes skanningen automatisk på nytt.

Når et bestemt tegn eller en bestemt funksjon er valgt, kan du velge en forsinkelse før neste valg gjøres. Dette hindrer uønskede påfølgende valg som følge av for eksempel rykninger.

Parameteren **Forsinkelse etter valg** angir forsinkelsestiden.

Allora kan legge til et lite lydsignal hver gang den viser neste tegn eller rad med tegn. Dette kan bidra til å holde rytmen oppe. **Lyd på** av angir om det skal gis et lydsignal ved hvert trinn.




Trykk  for å stoppe skanningen på Allora-enheten. Trykk på bryteren & for å starte skanningen igjen.

9.2 Bruke to brytere.

Bruk bryter 1 til å gå trinnvis gjennom de ulike sekvensene i skannealgoritmen. Bruk bryter 2 til å gjøre et valg.


Koble bryterne til de riktige bryterinngangene på Allora-enheten. Skanningen starter automatisk når du aktiverer bryter 1.



Trykk tastekombinasjonen   for å angi ønskede parametere. Følgende liste vises på skjermen:



Bruk piltasten  eller  til å velge elementet Skanning, og velg det med Enter-tasten . Følgende parameterliste vises på skjermen:

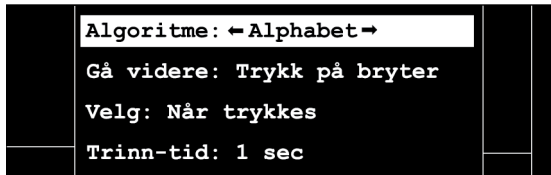

Velg først parameteren **Algoritme**. Hvis du har et QWERTY-tastatur, kan det være best å velge Qwerty, men du kan også bruke en annen algoritme: Alfabet. Denne algoritmen skanner ikke gjennom radene på tastaturet, men bruker en mer effektiv sekvens av tegn og funksjoner.

Sett parameteren **Gå videre** til Trykk på bryter. Det betyr at Allora viser de neste sekvensene når du aktiverer bryter 1. Hvis tegnet eller tegnsekvensen som inneholder tegnet du trenger, vises, trykker du på bryter 2 for å velge den.

Parameteren **Velg** gjør det mulig å bestemme om du skal velge ved å trykke (Ved trykk), ved å slippe bryteren (Ved slipp) eller ved å holde inne bryteren i et spesifikt tidsrom. Ved å stille inn en holdetid, kan du unngå uønskede tastetrykk.


Hvis du gjør en feil og for eksempel velger en rad som ikke inneholder det ønskede tegnet, kan du vente til Allora har gått gjennom denne raden noen ganger før den forlater den "uriktige" raden. Parameteren **Forlat rad** angir hvor mange ganger Allora går gjennom en rad før den forlates.

Pause skanning definerer antall sekvenser som Allora skal kjøre før den stopper algoritmen hvis det ikke er noen bryteraktivitet i løpet av tidsrommet. Hvis en bryter trykkes, startes skanningen automatisk på nytt.

Når et bestemt tegn eller en bestemt funksjon er valgt, kan du velge en forsinkelse før neste valg gjøres. Dette hindrer uønskede påfølgende valg som følge av for eksempel rykninger.

Parameteren **Forsinkelse etter valg** angir forsinkelsestiden.

Allora kan legge til et lite lydsignal hver gang den viser neste tegn eller rad med tegn. Dette kan bidra til å holde rytmen oppe. **Lyd på/av** angir om det skal gis et lydsignal ved hvert trinn.

Trykk  for å stoppe skanningen på Allora-enheten. Trykk på bryteren & for å starte skanningen igjen.








10 - Oversikt over menyen og de ulike innstillingene


Trykk tastekombinasjonen   for å åpne innstillingsmenyen på Allora-enheten. Følgende liste vises på skjermen:






Du kan når som helst gå ut av innstillingsmenyen ved å trykke på Applikasjon-tasten .

Følgende oversikt forklarer de ulike tastene du kan bruke til å endre parameterne:

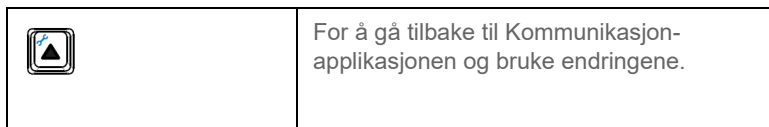 eller 	For å navigere i listen over viste parametere eller undermenyer.
 eller 	For å velge en undermeny.
 eller 	For å endre verdien til en parameter.
	For å gå ut av en undermeny



10.1 Tale

Trykk tastekombinasjonen   for å vise innstillingsmenyen, velg Tale og trykk . Følgende liste vises på skjermen:



Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.1.1 Språk

Velg mellom de ulike språkene som er tilgjengelige på din Allora.

10.1.2 Stemme

Velg mellom de ulike stemmene som er tilgjengelige for et spesifikt språk.

10.1.3 Hastighet

Definer talehastigheten. Jo høyere tallet er, desto høyere er talehastigheten.

10.1.4 Stemmevolum

Dette er volumet for den valgte stemmen. Dette volumet kan variere avhengig av språk, stemme og anvendt stemmeteknologi. Dette volumet skal bare stilles inn én gang. Verdi 7 er et godt valg. Du kan øke dette volumet hvis det er helt nødvendig. I noen tilfeller kan det føre til at stemmen blir forvrengt.

10.1.5 Generelt volum

Dette er voluminnstillingen for Allora-enheten. Denne parameteren kan også

endres med tastekombinasjonen   for å øke

volumet eller   for å redusere volumet.

10.1.6 Tegn-ekko

Når denne parameteren er angitt, uttaler Allora hvert tegn som tastes inn.

10.1.7 Ord-ekko

Når denne parameteren er angitt, uttaler Allora hvert ord som skrives inn (etter at mellomrom er valgt).

10.1.8 Angi ekko

En innskrevet melding uttales så snart du trykker på Enter-tasten


. Hvis funksjonen er deaktivert, kan du fortsatt bruke


Bekreft-tasten  til å uttale meldingen der markøren er plassert.

Bruk tastekombinasjonen   for å uttale alle meldinger som er skrevet inn etter en Tøm skjerm-kommando.


10.1.9 Legg til uttale

Hvis et bestemt ord uttales på feil måte, kan du legge det til i en uttaleordbok i Allora-enheten.

Trykk  for å legge til et ord:

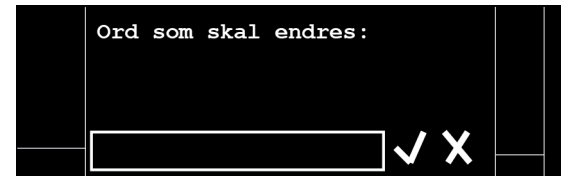

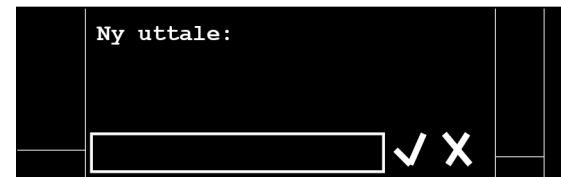

Skriv deretter inn ordet på en måte som gir bedre uttale.






Trykk  for å bekrefte eller  for å forkaste.


10.1.10 Fjern uttale

Trykk  for å vise listen over ord i uttaleordboken. Bruk piltastene  eller  til å velge et ord, og trykk på Enter-tasten .

Trykk  for å slette det fra ordboken, eller  for å avbryte.

10.2 Tastatur


Trykk tastekombinasjonen   for å vise innstillingsmenyen, velg Tastatur og trykk . Følgende liste vises på skjermen:

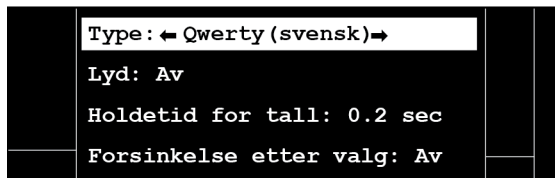

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.2.1 Type

Denne parameteren avgjør tastaturlayouten. Denne parameteren må bare endres hvis tastaturet ikke samsvarer med tastaturet på Allora-enheten.

10.2.2 Lyd

Slå på Lyd hvis du vil høre en lyd for hvert tastetrykk.

10.2.3 Holdetid for tall

Denne parameteren spesifiserer hvor lenge en talltast må holdes inne for å bruke det aktuelle tallet i meldingen.

Talltastene fra 1 til 5 brukes også til å velge en ordprediksjon. Dette gjøres ved å trykke kort på talltastene.

10.2.4 Forsinkelse etter valg

For å forebygge uønskede tastetrykk, for eksempel som følge av en rykning, kan du stille inn denne parameteren for å få en forsinkelsestid før et nytt tastetrykk blir akseptert.

10.2.5 Akseptforsinkelse


For å forebygge utilsiktede tastetrykk, for eksempel som følge av en rykning, kan du stille inn denne parameteren for å spesifisere hvor lenge en tast må holdes inne før den aksepteres.


Viktig merknad!

Når disse to siste parameterne er innstilt på en bestemt verdi, kan de gi inntrykk av at Allora-enheten har sluttet å reagere. Vær derfor oppmerksom på at tastaturet vil reagere langsomt hvis disse forsinkelsene er innstilt på et spesifikt tidsrom.

10.3 Skanning

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Tastatur og trykk . Følgende liste vises på skjermen:

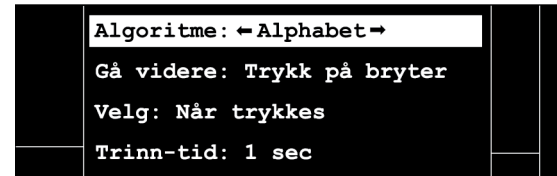

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.3.1 Algoritme

Denne parameteren angir algoritmen som skal brukes til å gå gjennom

sekvenser. Hvis du har et QWERTY-tastatur, kan det være best å velge Qwerty, men du kan også bruke en annen algoritme: Alfabet. Denne algoritmen skanner ikke gjennom radene på tastaturet, men bruker en mer effektiv sekvens av tegn og funksjoner.

10.3.2 Gå videre

Sett denne parameteren til Automatisk når 1 bryter brukes. De påfølgende sekvensene vises automatisk med en innstilt rytme (se Trinn-tid).

Hvis det brukes 2 brytere, skal denne parameteren settes til Trykk på bryter.

Det betyr at Allora viser de neste sekvensene når du aktiverer bryter 1. Hvis tegnet eller tegnsekvensen som inneholder tegnet du trenger, vises, trykker du på bryter 2 for å velge den.

10.3.3 Velg

Parameteren Velg gjør det mulig å bestemme om du skal velge ved å trykke (Ved trykk), ved å slippe bryteren (Ved slipp) eller ved å holde inne bryteren i et spesifikt tidsrom. Ved å stille inn en holdetid, kan du unngå uønskede tastetrykk.

10.3.4 Trinn-tid

"Trinn-tid" definerer hastigheten eller rytmen som Allora bruker til å gå trinnvis gjennom de ulike sekvensene.

10.3.5 Forlat rad

Denne parameteren stiller inn antall ganger Allora skal gå gjennom en rad før den forlates (i tilfelle du gjør en feil og velger feil sekvens).

10.3.6 Skannepause

Denne parameteren definerer antall sekvenser som Allora skal kjøre før den stopper algoritmen hvis det ikke er noen bryteraktivitet i løpet av tidsrommet. Hvis en bryter trykkes, startes skanningen automatisk på nytt.

10.3.7 Forsinkelse etter valg


Når et bestemt tegn eller en bestemt funksjon er valgt, kan du velge en forsinkelse før neste valg gjøres. Dette hindrer uønskede påfølgende valg som følge av for eksempel rykninger.

10.3.8 Lyd

Allora kan legge til et lite lydsignal (Lyd=på) hver gang den viser neste tegn eller rad med tegn. Dette kan bidra til å holde rytmen oppe.

10.4 Display

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Display og trykk . Følgende liste vises på skjermen:



Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.4.1 Lysstyrke

Still inn lysstyrken for det første displayet til 1, 2 eller 3 for å få lysere tegn. Vær oppmerksom på at høyere lysstyrke fører til høyere strømforbruk og kortere batterivarighet.

10.4.2 Kun store bokstaver

Når denne parameteren er innstilt, skriver Allora kun med store bokstaver på det 1. displayet.

10.4.3 Skrifftype for tekst


Parameteren Skrifftype for tekst definerer størrelsen til tegnene på skjermen fra 7 til 24 piksler.


10.4.4 Prediksjonsskrifftype

Parameteren Prediksjonsskrifftype definerer størrelsen til tegnene i ordet eller setningprediksjonen på skjermen fra 7 til 24 piksler.

10.5 Tilleggsdisplay


Trykk tastekombinasjonen   for å vise

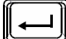
innstillingsmenyen, velg Tilleggsdisplay og trykk . Følgende liste vises på skjermen:

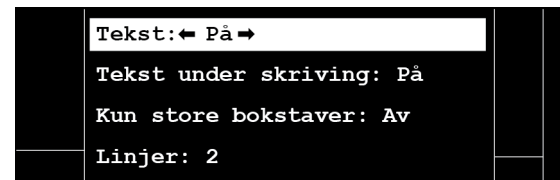

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.5.1 Tekst

Hvis parameteren Tekst er av, vises ikke meldingen på tilleggsdisplayet.

10.5.2 Tekst under skrivning

Hvis du ikke vil at meldingen skal vises på tilleggsdisplayet mens du skriver den, må denne parameteren settes til "Av". Da vises meldingen på tilleggs skjermen først når Allora uttaler den.

10.5.3 Kun store bokstaver

Når denne parameteren er innstilt, vises tegnene på tilleggsdisplayet kun med store bokstaver.

10.5.4 Linjer

Denne parameteren spesifiserer hvor mange tekstlinjer tilleggsdisplayet skal støtte. Du kan velge mellom 1, 2 og 3 linjer. Jo flere tekstlinjer du velger, desto mindre blir tegnene.

10.5.5 Lyd

Tilleggsdisplayet har små høyttalere. Disse høyttalerne blir vanligvis aktive så snart tilleggsdisplayet kobles fra Allora og trådløs tilkobling opprettes. Du kan imidlertid velge å slå av lyden fra høyttalerne på Allora (Lyd=Av).

10.5.6 Rulletepe

Denne parameteren definerer hvordan meldingen skal vises på tilleggsdisplayet når meldingen uttales.


"Skrivemaskin" betyr at ordene i meldingen vises ord for ord på tilleggsdisplayet synkronisert med talemeldingen.

Hvis "Undertekster" er valgt, prøver tilleggsdisplayet å vise så mange ord som mulig, synkronisert med talemeldingen.

10.6 Prediksjon

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Prediksjon og trykk . Følgende liste vises på skjermen:

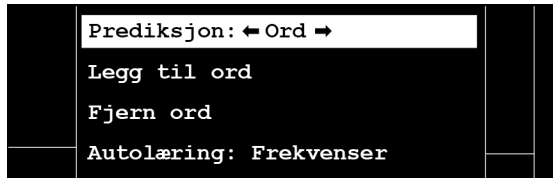

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.6.1 Prediksjon


Du kan velge ordprediksjon, setningprediksjon eller ingen prediksjon.


Ved ordprediksjon foreslår Allora maksimalt 5 ord. Trykk taltast 1 til 5 for å velge det korresponderende ordet.

Hvis setningsprediksjon brukes, trykker du taltast 1 for å velge setningen eller taltast 2 for å vise den neste setningen (hvis en er tilgjengelig).




10.6.2 Legg til ord

Velg denne parameteren for å legge til et nytt ord i

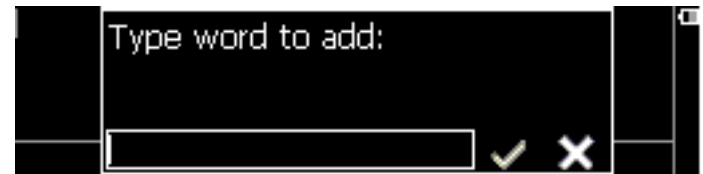prediksjonsdatabasen. Trykk på Enter-tasten . Følgende vindu vises på skjermen:




Skriv inn ordet du vil legge til i ordprediksjonsdatabasen.

Bekreft med Bekreft-tasten  eller  avbryt handlingen med .



10.6.3 Fjern ord

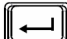Velg denne parameteren for å fjerne et ord fra

ordprediksjonsdatabasen. Trykk på Enter-tasten . Følgende vindu vises på skjermen:



Skriv inn ordet du vil fjerne fra listen over prediksjoner. Bekreft med

Bekreft-tasten  eller avbryt handlingen med  .

10.6.4 Auto-læring

Denne parameteren avgjør om Allora automatisk skal legge til nye ord i ordprediksjonsdatabasen.

"Av" betyr at ingen nye ord skal legges til i databasen

"Ord" betyr at Allora automatisk skal legge til ordene du skriver inn, i databasen. Hvis ordet allerede finnes, tilpasses frekvensen (sannsynligheten for at ordet skrives).

"Frekvenser" betyr at Allora bare justerer frekvensene for ord og ordpar i eksisterende databaseoppføringer.

"Alle" betyr at Allora automatisk legger til nye ord i databasen, og også justerer frekvensene for eksisterende databaseoppføringer.

10.6.5 Skill mellom store/små bokstaver

Hvis alternativet er valgt, tar ordprediksjonen hensyn til store bokstaver. Hvis alternativet er "Av", påvirkes ikke prediksjonen av store bokstaver.

10.6.6 Maks repetisjoner


Denne parameteren spesifiserer hvor ofte en prediksjon skal repeteres i den viste ordlisten før den blir erstattet av en annen prediksjon.

10.6.7 Justering av tegnsetting

Når denne parameteren er innstilt, legges det automatisk til et mellomrom etter punktum.

10.7 Dato/klokkeslett

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Dato/klokkeslett og trykk  .
Følgende liste vises på skjermen:



Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:

10.7.1 Endre dato



Trykk på Enter-tasten  og spesifiser året. Bekreft med

Bekreft-tasten  eller avbryt med . Følg samme fremgangsmåte for å fylle ut måned (1–12) og dag (1–31). Du hører et kort lydsignal på slutten av prosedyren.

Bruk tastekombinasjonen   for å høre datoen. Datoen vises også på skjermen.

10.7.2 Endre klokkeslett

Trykk på Enter-tasten  og spesifiser timen. Bekreft med

Bekreft-tasten  eller avbryt med . Følg samme fremgangsmåte for å spesifisere minutter. Du hører et kort lydsignal på slutten av prosedyren.

Bruk tastekombinasjonen   for å høre klokkeslettet. Klokkeslettet vises også på skjermen.

10.8 Mobiltelefon

Hvis Allora-enheten din er utstyrt med en GSM-modul, kan du initialisere enheten med disse innstillingene. Vær oppmerksom på at modulen bare støtter sending og mottak av tekstmeldinger.

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Mobiltelefon og trykk . Følgende liste vises på skjermen:



Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

10.8.1 Mobiltelefon


Med denne innstillingen kan du slå mobiltelefonenheten på eller av.

10.8.2 SMS-lyd

Velg lyden (1 til 3) du vil høre når en melding er mottatt.

10.8.3 Pin-kode

Trykk Enter  for å åpne undermenyen:

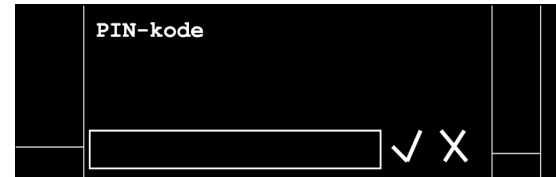

Angi Pin-koden som er knyttet til SIM-kortet. Bekreft med Bekreft-tasten  eller avbryt med .




10.8.4 Koble til (igjen)


Når Pin-koden er spesifisert, må du sette opp forbindelsen med telenettverket. Neste gang du starter Allora-enheten, gjøres dette automatisk (hvis parameteren Mobiltelefon er satt til "på").

Hvis du har mistet forbindelsen, bruker du Koble til (igjen) for å sette opp forbindelsen igjen.

10.9 Generelt

De generelle innstillingene spesifiserer menyspråk, strømstyring, favorittapplikasjoner osv.

Trykk tastekombinasjonen   for å vise innstillingsmenyen, velg Generelt og trykk . Følgende liste vises på skjermen:

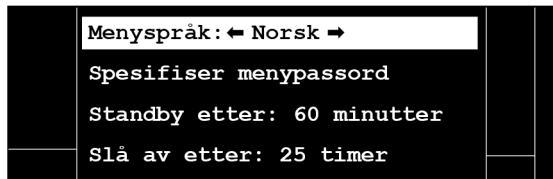

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Trykk  for å åpne en undermeny, hvis en er tilgjengelig.

Trykk  for å gå ut av en undermeny.

Følgende oversikt forklarer de ulike parameterne:


10.9.1 Menyspråk

Med denne parameteren kan du stille inn språket i menyen.

10.9.2 Spesifiser menypassord

Angi et passord for å hindre uautorisert tilgang til innstillingsmenyen. Hvis et passord er angitt, blir du bedt om å angi et passord hver gang du åpner innstillingsmenyen.

Trykk på Enter-tasten  for å spesifisere passordet.

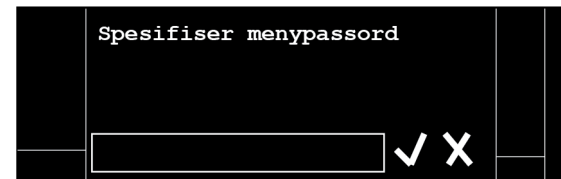

Bekreft med Bekreft-tasten  eller avbryt med .

Hvordan fjerne passordet?

Når du er i innstillingsmenyen, kan du fjerne det gjeldende passordet på følgende måte: Velg elementet "Generelt" og deretter "Spesifiser menypassord". Bekreft uten å fylle ut noen tegn. Nå kan du åpne innstillingsmenyen uten passord.

10.9.3 Standby etter

Hvis Allora-enheten ikke brukes i løpet av et bestemt tidsrom, går den automatisk til en modus der strømforbruket reduseres betydelig, for å spare batteriet. Denne modusen kalles standby-modus.

Parameteren Standby etter definerer hvor mange minutter som skal gå uten aktivitet før Allora-enheten automatisk går til standby-modus.

Vær oppmerksom på at standby-modus også kan aktiveres ved å trykke kort på av/på-tasten.

Allora-enheten aktiveres fra standby-modus så snart du trykker på en tast.

10.9.4 Slå av etter

Med denne parameteren kan du definere hvor mange timer som skal gå før Allora-enheten slås av automatisk.

Etter at Allora-enheten er slått av automatisk, må du starte den på nytt med av/på-bryteren.

10.9.5 Statuslinje

Når alternativet er valgt, viser Allora-enheten statusparametere på høyre side av skjermen. Følgende statusparametere vises:

Batteri, Demp, status for FN- og Shift-tast, meldinger, SMS-modus, signalstyrke.

10.9.6 Forkortelser


Sett denne parameteren til på for å utvide lagrede forkortelser automatisk.

10.9.7 Opptak med støyfilter


Hvis du vil gjøre et opptak i omgivelser med mye støy, kan du få bedre opptak ved å slå på støyfilteret.

10.9.8 Les lagret mld

Hvis du har meldinger som er lagret under en tast, kan du hente

dem opp ved å trykke på meldingstasten  og den aktuelle tasten. Deretter vises meldingen på skjermen. Hvis parameteren Les lagret mld er "på", blir meldingen også uttalt automatisk.

10.9.9 Stjerne

Allora-enheten har en spesialtast, stjernetasten , som du kan bruke til å starte favorittapplikasjonen din. Velg ett av de følgende alternativene:

- <Ingen>
- Opptak: for å gjøre et lydopptak
- Ny SMS: for å lage en ny tekstmelding
- Les SMS: for å lese en tekstmelding
- IR send: for å sende en kommando for omgivelseskontroll
- Lesetid: for å lese opp klokkeslettet
- Opptak (A): for å høre opptaket under bokstaven A
- Melding (A): for å høre meldingen under bokstaven A

10.9.10 Shift Stjerne

På samme måte som stjernetasten, kan tastekombinasjonen

  også knyttes til en av favorittapplikasjonene dine.

10.9.11 Fn+Stjerne

På samme måte som stjernetasten, kan tastekombinasjonen


  også knyttes til en av favorittapplikasjonene dine.


10.10 Verktøy-meny

Allora støtter en rekke applikasjoner. Hovedapplikasjonen brukes til kommunikasjon, men du kan også gjøre lydopptak eller ta notater. Allora-enheten kan også ha ytterligere bruksområder hvis den er utstyrt med en IR-modul for omgivelseskontroll og/eller med en GSM-modul for å sende og motta SMS-meldinger. Med Verktøy-menyen kan du velge hvilke applikasjoner som er tillatt.

Når du trykker på applikasjonstasten , vises bare disse applikasjonene.

Trykk tastekombinasjonen   for å vise

innstillingsmenyen, velg Verktøy-menyen og trykk . Følgende parameterliste vises på skjermen:

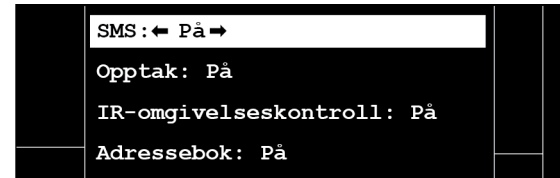

Bruk piltastene  eller  for å velge en parameter.

Bruk piltastene  eller  for å endre verdien til en parameter.

Angi verdien "på" for applikasjonene du vil tillate å bruke. Applikasjoner som er satt til "av", vises ikke i applikasjonslisten når

du trykker på applikasjonstasten .

10.11 Sikkerhetskopier/gjenopprett


Med denne funksjonen kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette data, for eksempel lagrede meldinger, lydopptak og IR-koder på en minnepinne. Hvis dataene på enheten din av en eller annen grunn blir slettet (tap, reparasjon), kan du gjenopprette dataene fra USB-minnepinnen til Allora-enheten.

Dette verktøyet kan også brukes til å installere en fastvareoppdatering eller gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Trykk tastekombinasjonen   for å vise innstillingsmenyen, velg Sikkerhetskopier/gjenopprett og trykk



. Følgende parameterliste vises på skjermen:

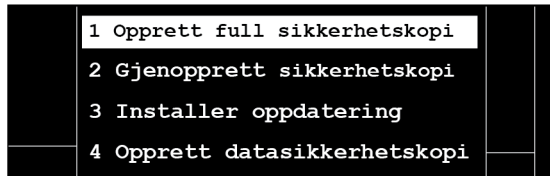

Bruk piltastene  eller  for å velge en prosedyre.

Trykk  for å starte prosedyren.

Følgende oversikt forklarer de ulike prosedyrene:

10.11.1 Opprett full sikkerhetskopi

Brukes til å opprette en sikkerhetskopi av både applikasjonsprogramvaren og dataene på Allora-enheten. Forsikre deg om at en USB-minnepinne er koblet til Allora-enheten.

10.11.2 Gjenopprett sikkerhetskopi

Gjenopprette en sikkerhetskopi fra en USB-minnepinne. Forsikre deg om at en USB-minnepinne er koblet til Allora-enheten.

10.11.3 Installer oppdatering

Hvis en ny versjon av Allora-applikasjonsprogramvaren blir tilgjengelig, kan du først kopiere den til en minnepinne og deretter installere den med Installer oppdatering på Allora-enheten.

10.11.4 Opprett datasikkerhetskopi

Dette lagrer bare Allora-dataene – for eksempel opptak, lagrede meldinger og IR-koder – på en USB-minnepinne. Forsikre deg om at en USB-minnepinne er koblet til Allora-enheten.

10.11.5 Gjenopprett datasikkerhetskopi

Kopier Allora-data fra en USB-minnepinne tilbake til Allora-enheten.

10.11.6 Gjenopprett fabrikkstandarder

Velg dette alternativet for å tilbakestille alle parametere til fabrikkinnstillinger.

Dette sletter også alle data fra Allora-minnet.

