

Sengemonitor P200C

Monitor for epilepsivarsling

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. En kan koble forskjellige sensorer til den. Følsomhet og tid kan justeres.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved eksternt varsling* må bruker selv dekke abonnement til mobiltelefon.
- Anbefalt vektområde for «Standard» bevegelsessensor P140B er 20 – 200 kg.
- Hvis brukers vekt er lavere, bruker en bevegelsessensor P140A for 6 – 25 kg. Risteføler P140A for 6-25 kg vårt art.nr: 700140 HMS nr: 289666
- Deteksjon av spasmebevegelser er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- For deteksjon av repeterende lyder brukes en innebygd mikrofon.
- Kan koble til 1 sensor for fravær og 1 for fukt sammen med bevegelse. Legg til eller bytt ut sensor med en fra listen nederst.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor:	Risteføler P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165
Mottaker:	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt

Sensor:	Risteføler P140B	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor impuls P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av fravær – kan velge en av disse

Sensor:	Ribbesensor 1 m P143G	vårt art.nr: 701432	HMS nr: 194989
Sensor:	Ribbesensor 0,5 m P149B	vårt art.nr: 701491	HMS nr: 189367
Sensor:	Stolmatte (liten) P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991

For deteksjon av fukt – kan velge en av disse

Sensor:	For seng, laken P142A	vårt art.nr: 700142	HMS nr: 189366
Sensor:	For pute, pute P142F	vårt art.nr: 701411	HMS nr: 233360

**) Ved bestilling av eksternt varsling med GSM viderevarsling – se neste side.*

*) Ved bestilling av varsling eksternt med GSM viderevarsler:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

