

## Enkel bruksanvisning av NightWatch



- Sørg for at armbåndet er justert til riktig størrelse før bruk, slik at den ikke er for stram eller for løs, se bruker veil. for nærmere beskrivelse.
- For at armbånd/sensor skal registre epileptiske anfall så nøyaktig som mulig, skal armbånd/sensor bæres på overarmen (biceps) og direkte på huden.

### Første aktivering og lading av armbånd/ sensor

1. For å slå på armbånd, skli bryter på undersiden av armbånd mot ladeplugg, to grønne lys tennes på undersiden
2. Lad opp armbåndet. Batteriladetid: ca. 3 timer. Må være påslått under lading
3. Koble Base stasjon til strømtilførsel.

### Daglig bruk

4. Ta på armbånd. Fulladet batteri vare ca. 12 timer.
5. Armbånd lades når utstyret ikke benyttes, skal være påslått.
6. Basestasjon skal være påslått heletiden, alltid klar til bruk.

For mer informasjon se brukerveiledning